


TYMPANO Thermometer

➔ Exakte Messung der Körper-Kerntemperatur

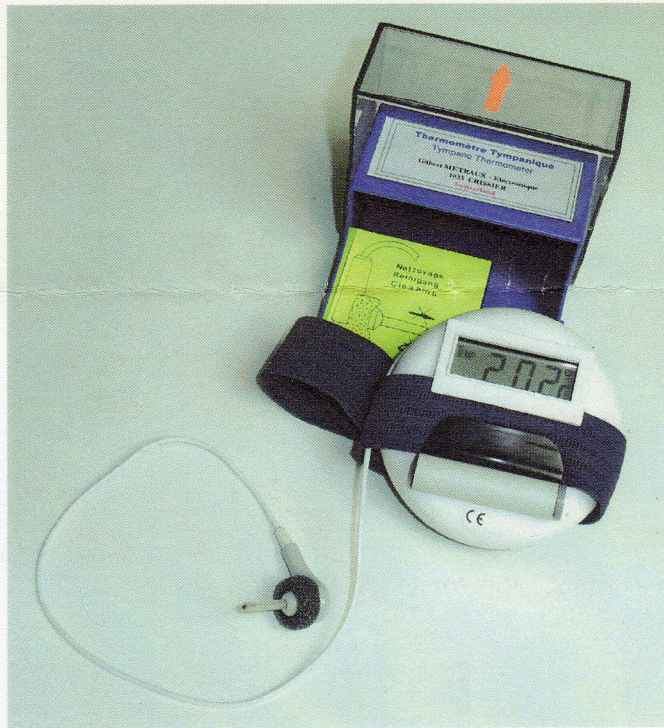

Gebrauchsanleitung:

Vor Anwendung des Gerätes ist ein Freimachen des Gehörganges von Blut, Schnee und dergleichen erforderlich! Zur genauen Messung der Temperatur ist der Fühler möglichst luftdicht im Gehörgang zu applizieren. Danach sorgt die mit einem weichen Schaumgummiring geschützte Isoliermuschel, in die der Messfühler eingebaut ist, für eine sichere Isolierung gegen Umwelteinflüsse wie Außentemperatur, Schnee und Wind.

Besonders zu achten ist auf die richtige Fixierung der Isoliermuschel und des Fühlers im Ohr. Dazu sollte das elastische Stirnband über Isoliermuschel und Ohr gelegt werden, wodurch auch das Anzeigegerät auf der Stirn festgehalten wird und die Temperatur gut abgelesen werden kann. Nach etwa zwei Minuten ist die Angabe der Körper - Kerntemperatur auf der deutlich lesbaren LCD - Anzeige (2 x 4 cm) erreicht.

Das Thermometer wurde auf drei Temperaturstufen eingeeicht und wird mit einer 1,5 Volt Batterie (nach IEC Typ Micro LR03) betrieben. Bei eingelegter Batterie ist das Gerät automatisch einsatzbereit. Die Mitnahme einer Austauschbatterie wird empfohlen. Das Gerät ist in einer Klarsichtbox transportsicher verstaut.

Reinigung des Gerätes:

Die Reinigung kann mit medizinischen Flächendesinfektionsmitteln erfolgen. Schaumgummiring nach Reinigung gut trocknen lassen.!

Nach dem Medizinproduktegesetz handelt es sich um ein Gerät der Klasse 2 A.